



FICHA TÉCNICA

Optigerm® Wipe

Optigerm®

panos umedecidos

USO ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DESINFETANTE HOSPITALAR
para Superfícies Fixas e Artigos não Críticos

Ação em
1min

1 - PRODUTO

Optigerm® Wipe

2 - DESCRIÇÃO

Optigerm® Wipe é um excelente agente de auxílio ao combate e prevenção das infecções hospitalares. É um pano de alto poder de absorção, umedecido com um poderoso desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não-críticos. Seu amplo espectro de ação o torna especialmente recomendado para limpar e desinfetar as superfícies próximas ao paciente que, por serem mais tocadas, oferecem maior risco de contaminação cruzada e proliferação de infecções.

Classe química dos princípios ativos:

Limpaadores: tensoativos catiônicos e não iônicos.

Biocidas - mistura sinérgica de:

Polihexametileno biguanida (PHMB) - 1.600ppm

Quaternário de amônio de quinta geração - 2.400ppm.

3 - APLICAÇÃO

Optigerm® Wipe deve ser usado em hospitais, clínicas médicas e odontológicas, laboratórios de análises clínicas, ambulatórios médicos, veículos de transporte e resgate de doentes e acidentados, hemocentros, clínicas de hemodiálise e demais estabelecimentos de auxílio à saúde.

Possui rápida ação biocida, inclusive contra

germes multirresistentes, por essa razão, oferece maior conveniência ao profissional de saúde, sendo especialmente adequado para uso em UTI, centro cirúrgico, áreas de prevenção de contágio, CME, unidade de queimados, hematologia, oncologia, emergência clínica e cirúrgica, berçário, maternidade e demais áreas onde se concentram pacientes com elevado grau de imunodepressão ou onde são realizados procedimentos invasivos.

Seus componentes não são agressivos aos substratos e seu uso é totalmente seguro em diversas superfícies, dentre elas colchões, grades e painéis de comando de leitos, móveis rígidos e estofados, registros, suporte de soro, além de equipamentos como monitores, transdutores, bombas de infusão, oxímetros, esfigmomanômetros, entre outros.

IMPORTANTE: Na limpeza e desinfecção de equipamentos eletro-eletrônicos, é importante evitar que o líquido esorra para o interior dos aparelhos, pois isso pode causar danos às partes eletrônicas.

4 - CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Fácil de usar: no seu dia-a-dia, os profissionais de saúde precisam ter à mão produtos eficazes e que realmente cumpram a finalidade proposta. Desta forma, Optigerm® Wipe se caracteriza como uma poderosa arma de combate às infecções hospitalares.

Rápida ação: em apenas 1 minuto, Optigerm® Wipe elimina uma grande variedade de germes, inclusive fungos, bactérias gram negativas, gram positivas e multirresistentes.

Elevado poder germicida: Optigerm® Wipe tem, como princípio ativo, a combinação sinérgica de dois germicidas potentes: a PHMB e o quaternário de amônio de quinta geração. Possui eficácia comprovada inclusive contra micobactérias e esporos. A lista completa de germes testados está disponível no website da Oleak.

Oleak Indústria e Comércio Ltda.

Rua Rondônia, 186 - Cotia - SP

CEP 06703.710 - Fax: (11) 4616.0138

SAC sac@oleak.com.br
3201-0000

Age na presença de matéria orgânica: os testes de eficácia microbiológica de Optigerm® Wipe foram realizados na presença de soro animal. Diferente de ativos como cloro, peróxidos e quaternários isolados, que perdem eficácia na presença de detritos orgânicos, Optigerm® Wipe limpa e desinfeta numa única operação, oferecendo ao profissional de saúde muito mais conveniência.

Efeito residual comprovado por 30 dias: as superfícies limpas e desinfetadas com Optigerm® Wipe ficam menos propícias à recontaminação, pois seus ingredientes permanecem ativos por muito tempo. Essa fato confere ao produto uma grande vantagem quando comparado a ativos que se desintegram, como cloro e peróxidos, ou que evaporam rapidamente, ao exemplo do álcool etílico.

Não irrita pele e olhos. Não oxida superfícies: Optigerm® Wipe é seguro. Testes comprovam a sua baixa toxicidade em humanos. Além de ser biodegradável, a compatibilidade de Optigerm® Wipe foi comprovada sobre diversos substratos, tais como metais ferrosos e não ferrosos, plástico (inclusive acrílico), vidro, fórmica, porcelana, pinturas epoxi, borracha, etc. Conforme a Resolução ANVISA nr. 211, de 18 de junho de 1999, a PHMB e o quaternário de amônio podem ser utilizados sem risco em superfícies onde se dá o preparo, o consumo e a estocagem de alimentos.

Alto rendimento: os panos de Optigerm® Wipe são umedecidos com quantidade precisa de desinfetante líquido, explorando a sua capacidade máxima de absorção e dispensação. Cada pano cobre área de aproximadamente 1,5 m², garantindo que a superfície fique úmida pelo tempo necessário para que haja a desinfecção. Outros produtos concorrentes não cumprem essa exigência, colocando em risco pacientes e profissionais de saúde.

5 - MODO DE USAR

Passe o pano umedecido na superfície ou artigo não crítico, espalhando uniformemente a solução por toda área. Mantenha a área úmida com a solução por pelo menos 1 minuto.

Deixe secar naturalmente. No caso de artigos que entram em contato prolongado com a pele ou

mucosas, recomenda-se enxaguar e secar com meio estéril. Utilizá-los o mais breve possível. Utilize panos umedecidos adicionais, se necessário, para assegurar o tempo correto de contato com a superfície.

Despreze o pano umedecido após utilizado.

6 - PRECAUÇÕES, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- Conserve fora do alcance das crianças e animais domésticos.
- Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele.
- Em caso de contato com os olhos, lavá-los com água em abundância por 15 minutos.
- Não misturar com outros produtos.
- Não utilizar para desinfecção de alimentos.
- Em caso de ingestão acidental, não induzir ao vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Não reutilizar a embalagem vazia.
- Evitar estocar sob temperaturas elevadas.
- Manter o produto em sua embalagem original.
- Manter a embalagem sempre bem fechada.
- Não utilizar para limpeza pessoal.

7 - COMPONENTES DA FÓRMULA

- Polihexametileno biguanida.....1.600 ppm.
- Quaternário de amônio.....2.400 ppm.
- Agentes de limpeza, ação contra biofilme e outros ingredientes.....q.s.p. 100%.

8 - APRESENTAÇÃO

- Caixa com 6 potes com 100 panos cada pote.

9 - REGISTROS E DOCUMENTAÇÕES

- Registro na ANVISA/MS.....3.1003.0107
- Ficha de segurança - MSDS.....disponível